

Nakabayashi

RQS-S101

10段階調整可能、自分の身長に合わせやすい！

スタンダードタイプ

# 伸縮ステッキ

全長：77～99cm

 SGマークが表示されたつえは安心してお使いいただけます。

SGマークが表示されたつえは安心してお使いになれますが、消費者の皆様が正常に使用していた時に、製品の欠陥により万一事故が発生し、人身の損害を被った場合には、「製品安全協会」がその損害を賠償いたします。  
★ただし、保証期間はご購入後3年です。

■賠償についてのご注意

●つえそのものが故障しても、その品質について保証するというものではありません。あくまでも損害など身体的な損害について賠償する制度です。

●生産物賠償責任保険の保険金は、それぞれ実情をよく調査して、実を損補する妥当な額をお支払いすることになります。

■製品の欠陥によって事故が起きた場合

事故が起きた場合には、下記の(財)製品安全協会へ連絡して下さい。

財団法人 製品安全協会 東京都台東区竜泉2-20-2  
TEL 03-5808-3300(代表)



10段階伸縮



棒状つえ  
製品安全協会

## 取扱説明書

このたびは、弊社商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- この説明書は製品のご使用にあたり、注意していただきたい事項について説明したものです。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要な時にご利用ください。

### ご使用前の注意事項

棒状つえは、つえ無しで自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用するものです。次のような場合の使用には適してません。(体重をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛めることもあるからです)また、購入時はそうではなくても、次のような状態になった場合の使用も中止すべきです。

①つえなしでは歩行できない方の使用(手すりに伝わらなければ歩行できない方や、介助者に手伝ってもらわなければ歩行できない方の使用が含まれます。)②リハビリ中などのように、体重の一部を支えないと歩行できない方。ただし、医師などの指導のもとでの使用は含みません。

### △ご使用上の注意事項 安全のため必ずお守りください。

- 身体に合ったつえを選んでください。
- 使用前に各部を点検してください。
- つえ先ゴムが摩耗してきたり、劣化して外れやすくなったりした場合は、早めに取り替えてください。
- 使用中にも、支柱の継ぎ目、長さ調節部と止めネジが確実固定されていることを確認してください。
- 濡れたり、凍ったりした路面は滑りやすいため、十分ご注意ください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では、つえ先がはまり込む場合があるため、十分注意してください。
- 歩行補助以外の用途では、使用しないでください(例えば登山や護身用など)。
- 製品の分解や改造、修理を行ったり、部品がはずれたまま使用しないでください。
- ゴムロープにゆるみ、損傷など異常があった場合、当社に連絡してください。


### 製品仕様とつえ長さの目安

■製品仕様

本体	アルミ
取っ手	楓木
全長サイズ	77～99cm
重量	236g


■長さ調節方法

- 1.止めネジを緩めてください。
- 2.調節ピンを押しながら、適度な長さを調節してください。
- 3.止めネジを締めてください。

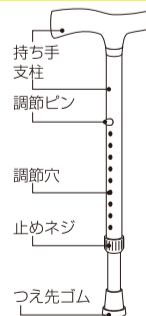

■つえ長さの目安

つえの先を足先の前外方20cmにおき、肘は30～40度屈曲した位置にくるようにつえをつく状態が、つえ長さの目安です。(右の図に参照してください。)

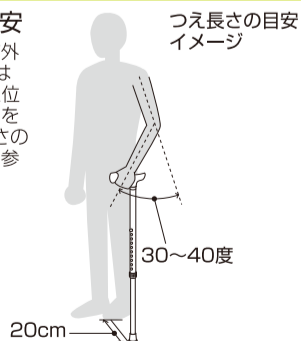

## ナカバヤシ株式会社

〒536-0005 大阪市城東区中央2丁目1-23

商品に関するお問い合わせは... 受付時間 10:00～12:00 13:00～17:00

☎0120-166-779

NOW ON NET ナカバヤシホームページは下記のアドレスでご覧になれます。  
<http://www.nakabayashi.co.jp/>



袋：PVC



4 902205 793502  
RQS-S101BR  
MADE IN TAIWAN